



adant[®]

Stappen vooruit in beweging

Vermindert aanzienlijk de gewrichtszwelling en pijn¹.

Positieve lange termijn resultaten².

Veilig in gebruik.

Niet van dierlijke oorsprong, geproduceerd door middel van biotechnologie.

Patiënten met artrose

Patiënten met artrose krijgen vaak ontstekingsremmers en pijnstillers voorgeschreven in combinatie met oefentherapie. Naarmate de klachten ernstiger worden, kunnen er krachtiger pijnstillers worden voorgeschreven. Deze middelen veroorzaken elk hun eigen bijwerkingen, bijvoorbeeld maagklachten. Daarnaast krijgen sommige patiënten injecties met corticosteroïden. Corticosteroïden injecties geven op korte termijn voor een periode van ongeveer 4 tot 6 weken vermindering van pijn bij artrose van de knie.



Behandelen met Adant

U kunt er ook voor kiezen om uw patiënt te behandelen met Adant (hyaluronzuur injectie).

Adant en Adant One

- Adant wordt geleverd in twee uitvoeringsvormen, Adant en Adant One.
- Medisch Hulpmiddel, Klasse III.
- Bacteriële fermentatie, niet-dierlijk/streptococcus, minder kans op allergische reacties.
- LMW: 900.000 D.
- Linear natriumhyaluroonaat.
- Veilig in gebruik, wereldwijd in meer dan 45 landen goedgekeurd en verkocht.
- Klinische werkzaamheid aangetoond in diverse klinische studies met meer dan 3.600 patiënten, zoals het AMELIA- project².

adant[®]

Gedurende 3 tot maximaal 5 opeenvolgende weken, elke week een injectie Adant in het aangedane gewricht geven. De klachten kunnen voor ongeveer 6 tot 9 maanden verholpen worden¹.

- Verpakking met één, drie of vijf intra-artculaire injecties.
- 2,5ml met 25mg natriumhyaluroonaat.

adant
One

Met één injectie Adant One in het aangedane gewricht, kunnen de klachten voor ongeveer 6 tot 9 maanden verholpen worden⁴.

- Eénmalige intra-artculaire injectie.
- 5ml met 49mg natriumhyaluroonaat.

Adant is een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.


De klinische werkzaamheid van Adant is aangetoond in diverse klinische studies met meer dan 3.600 patiënten, zoals in het AMELIA-project².

Uitkomst studie

Een 40 maanden durende studie (multicentre, randomised, placebo-controlled) om de doeltreffendheid en het overdrachtseffect te beoordelen van herhaalde intra-articulaire injecties van hyaluronzuur bij artrose van de knie: het AMELIA-project.


- Verbetering van de symptomen van artrose van de knie tijdens de tussenliggende cyclusperiode.
- Significant carry-over effect gedurende tenminste 1 jaar na de laatste cyclus met Adant ten opzichte van placebo (p<0,05).
- Bij het 40 maanden bezoek waren er aanzienlijk meer patiënten die reageerde op Adant vergeleken met het placebo.
- Het aantal responders op Adant nam toe tijdens de studie, terwijl die voor placebo niet veranderde.
- Significante verschillen werden gevonden in het voordeel van Adant voor elk afzonderlijk onderdeel van de OARSI 2004 (p= 0,004).

De resultaten van het AMELIA-project maken duidelijk dat herhaalde cycli van intra-articulaire hyaluronzuurinjecties niet alleen een verbetering geven van de symptomen van de artrose van de knie in de periode tussen de behandelingscycli, maar ook dat deze verbetering tot minstens 1 jaar na de laatste injecties blijft aanhouden.

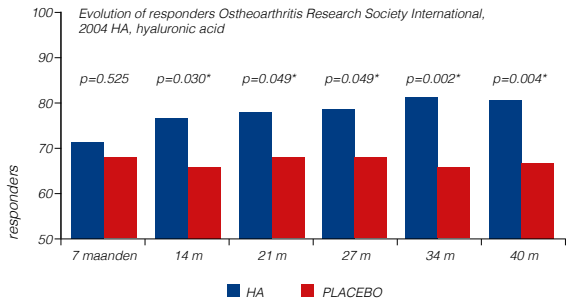

Vergelijking van de werkzaamheid van viscosupplementatie met een lager en hoger moleculairgewicht bij de behandeling van heupartroses³.

Beide categorieën bereikten significante verbeteringen in alle resultaat metingen in de beginperiode en dit voordeel werd behouden. Er was geen significant verschil tussen de klinische werkzaamheid in de 1e, 3e en 6e maand van de follow-up periode.

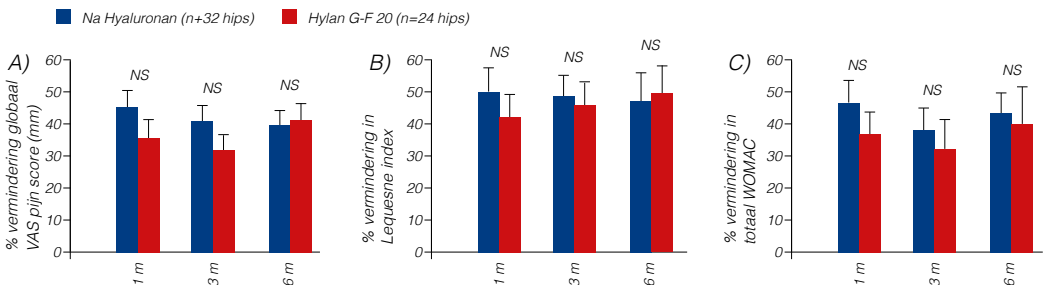



Meer weten?

Wilt u meer informatie over Adant of Adant One? Neem contact met ons op of kijk op www.Adant.nl.

U kunt Adant rechtstreeks bestellen bij de groothandel onder vermelding van het Z-index nummer.

Uw patiënt kan Adant verkrijgen zonder recept van arts of specialist bij de apotheek. Indien Adant daar nog niet beschikbaar is, kan de apotheek Adant bestellen bij de groothandel onder vermelding van het Z-index nummer.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen om verdere mogelijkheden voor verkrijgbaarheid nader te bespreken. U kunt ons telefonisch bereiken op +31 (0)88 4 222 000 of per e-mail info@tramedico.nl.

Adant 1-injectie, ZI-nummer 15107248
Adant 3-injecties, ZI-nummer 15107256
Adant 5-injecties, ZI-nummer 15107264
Adant One, ZI-nummer 15939634

Adant dient altijd geïnjecteerd te worden door een arts of specialist.

Samenvatting van gebruiksindicaties

Adant (2,5 ml): osteoarthritis van de knie en scapulo-humerale peri-arthritis. Graad I, II en III van trapezoid-metacarpale osteoarthritis. Pijn en een verminderde mobiliteit als gevolg van degeneratieve en traumatische veranderingen in andere synoviale gewrichten.

Adant ONE (4,9 ml): lichte en gematigde knieartrose.

Adant is niet aangewezen voor patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor het product. Het product dient met zorg toegediend te worden aan patiënten met een voorgeschiedenis van overgevoeligheid aan andere geneesmiddelen en aan patiënten met leverstoornissen of -insufficiëntie.

De veiligheid van dit product voor zwangere vrouwen is niet aangetoond. Het product dient daarom met zorg toegediend te worden aan zwangere vrouwen of vrouwen die vermoedelijk zwanger zijn. Natriumhyaluronaat wordt afgescheiden in de melk, het is dus aangeraden om de borstvoeding te onderbreken tijdens de behandeling.

Adant wordt geleverd in steriele wegwerpspuiten die 2,5 ml natriumhyaluronaat bevatten (25 mg). De verpakking bevat 1, 3 of 5 spuiten. Adant One wordt geleverd in steriele wegwerpspuiten die 49 mg natriumhyaluronaat bevatten. De verpakking bevat 1 injectie.

Referenties

- ¹⁾ Möller I, Larrea A, Roig D, et al. A multi-centre follow-up study of patients with gonarthrosis treated with intra-articular injections of hyaluronic acid. *Rev Esp Reumatol* 2000; 27(8): 337-45.
- ²⁾ Navarro F., et al. A 40-month multicentre, randomised placebo-controlled study to assess the efficacy and carry-over effect of repeated intra-articular injections of hyaluronic acid in knee osteoarthritis: the AMELIA project. *Ann Rheum Dis*. 2011;70:1957-1962
- ³⁾ Tikiz C., et al. Comparison of the efficacy of lower and higher molecular weight viscosupplementation in the treatment of hip osteoarthritis. *Clin Rheumatol*. 2005;24: 244-250
- ⁴⁾ Rodrigo Royo MD, Quero López JC, Aparicio Abiol RM et al. Efficacy of intra-articular injections of hyaluronic acid for the treatment of osteoarthritis of the knee: results of a series of cases treated in a pain unit. *Rev Soc Esp Dolor* 2017; 24(2): 74-84.

Adant wordt in Nederland op de markt gebracht door Tramedico B.V.



passionately bringing
meaningful innovations